

Руководство по эксплуатации

Столик-тележка медицинская инструментальная "Медицинофф" с принадлежностями, вариант исполнения: F-17



Регистрационное удостоверение №: ФСЗ 2010/08140 от 03.04.2017 г.

Наименование медицинского изделия: Столик-тележка медицинская инструментальная "Медицинофф", вариант исполнения: F-17

Выдано: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНОФФ» (ООО «МЕДИЦИНОФФ»), Россия, 119192, Москва, Мичуринский проспект, д.22, корп.1

Производитель: «Хебей Пуканг Медикал Инструментс Ко., Лтд.», Китай, «Hebei Pukang Medical Instruments CO., LTD», Китай, Hebei Province 072550 China

Декларация о соответствии № РОСС СN.АГ81.Д24907, Орган по сертификации продукции ООО «Бирюза», 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	4
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
4. СБОРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.....	5
5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	7
6. СРОКИ СЛУЖБЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	7
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	8
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый Клиент, благодарим Вас за доверие, которое Вы оказали нам, приобретя столик-тележку медицинскую инструментальную серии «Медицинофф». Каждое изделие серии «Медицинофф» проходит обязательное тестирование и потому отличается качеством и долговечностью.

Теперь процесс выздоровления действительно станет быстрым и эффективным. Ведь столики-тележки медицинские серии «Медицинофф» - лучшее решение для оснащения медицинского учреждения любого профиля.

Для того чтобы Вы понимали насколько функционален наш столик-тележка мы предоставляем Вам подробную информацию о данном изделии. В Руководстве содержится информация о технических характеристиках и функциях, необходимая для управления и ежедневного использования столика. Рекомендуем Вам регулярно обращаться к данному Руководству, как к практическому справочнику, постоянно находящемуся под рукой.

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данным Руководством.

Компания «Медицинофф»

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Завод-изготовитель постоянно работает над повышением качества продукции, поэтому характеристики изделия могут иметь непринципиальные отличия от конструкции, описанной в настоящем Руководстве.

1.1. Назначение изделия и область применения

Столик-тележка медицинский инструментальный серии «Медицинофф» F-17 предназначен для перевозки и размещения медицинских инструментов и принадлежностей. Изделие адаптировано к использованию в операционной, отделении интенсивной терапии, общепольничной палате, а также для использования в различных учебных медицинских учреждениях.

Столик-тележка медицинский инструментальный серии «Медицинофф» изготовлен из нержавеющей стали и высокопрочного АБС-пластика. Материалы устойчивы к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Поставляется в разобранном виде. Столик имеет четыре колеса, два из которых оборудованы индивидуальным тормозом.

1.2. Меры безопасности

Изделие разрешается использовать, только при полной уверенности в том, что оно находится в отличном состоянии, чтобы избежать травмирования в процессе эксплуатации изделия.

При длительном использовании изделия проверьте его функции и убедитесь в отсутствии внешних повреждений по истечении соответствующего периода времени.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры изделия:
Высота – 970 мм
Длина – 720 мм
Ширина – 460 мм
Масса изделия – 13 кг
Основные функциональные характеристики:
Столик имеет три полки из высокопрочного ABS пластика, устойчивого к обработке моющими и дезинфицирующими растворами
Максимально допустимая нагрузка на полку – 30 кг
Размер рабочей поверхности полок, Д×Ш - (685×425) мм
Столик-тележка установлен на 4 самоориентирующиеся колеса Ø 100 мм 2 колеса имеют индивидуальный тормоз

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

После получения изделия, следует осмотреть упаковку, затем проверить сопутствующие документы и приложения на комплектность и удостовериться, что при транспортировке изделию не было нанесено повреждений.

Столик-тележка медицинская инструментальная «Медицинофф», вариант исполнения: F-17		
№	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Стойка дугообразная (нерж.)	2
2.	Полка из ABS пластика	3
3.	Угловые пластиковые держатели полок	12
4.	Трубки ограждений (нерж.)	18
5.	Самоориентирующиеся колеса	4
6.	Фиксатор полок	12
7.	Комплект фурнитуры	1

4. СБОРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


После транспортирования изделий в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных условиях не менее 2 часов. Распаковать изделие и проверить целостность покрытия. Проверить комплектность. Осуществить сборку согласно инструкции.



Порядок сборки

Во избежание перекосов и других дефектов при сборке изделия, все работы необходимо производить на ровном полу. Перед началом работы определите назначение каждой детали.

Сборку производить в следующей последовательности:

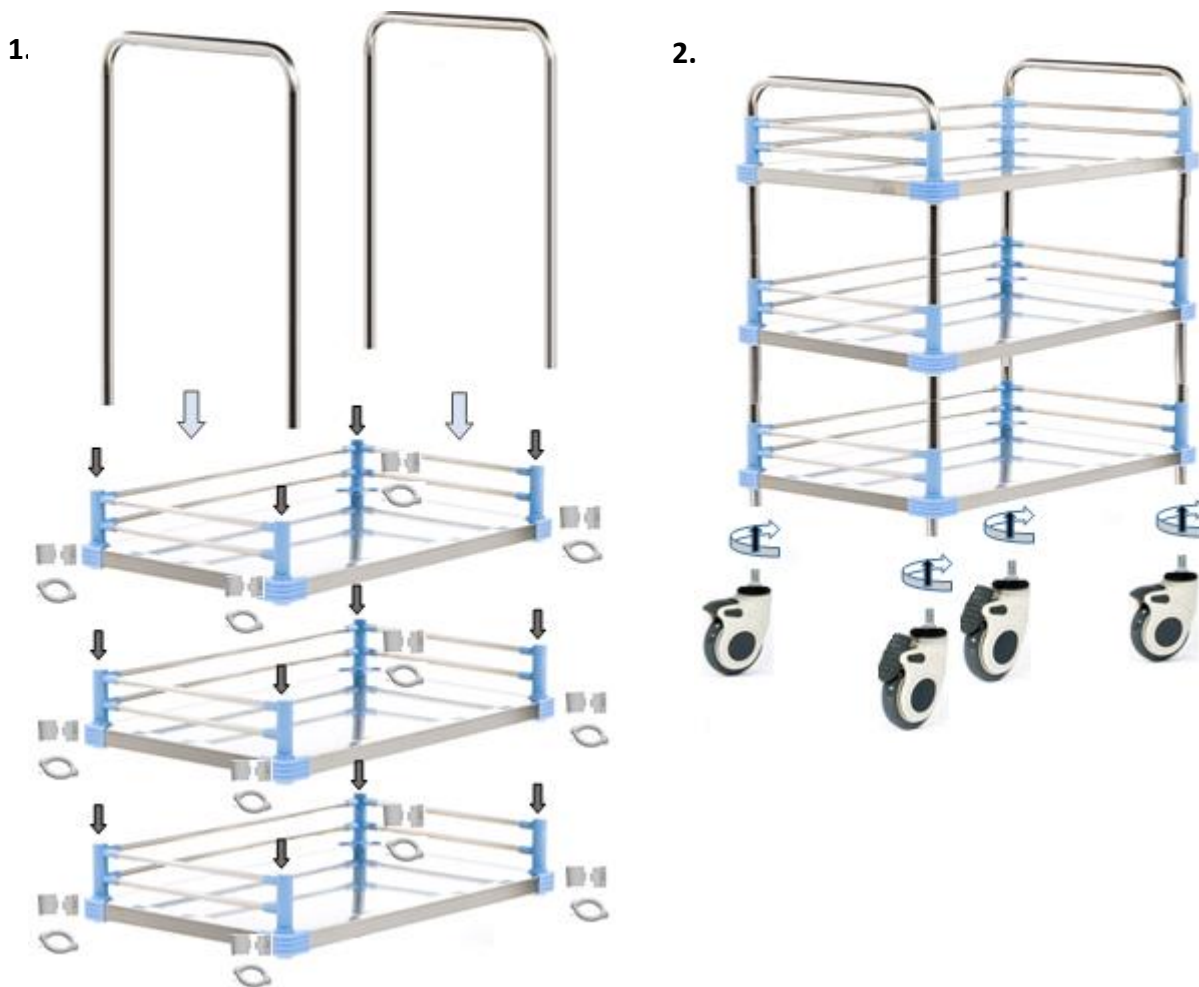

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обеспечить долгий срок службы изделию можно, соблюдая следующие инструкции по эксплуатации:

1. Запрещается использовать столик для транспортировки тяжелых предметов.
2. Изделие подлежит обязательной регулярной стерилизации в соответствии с требованиями медицинского учреждения.
3. Необходимо беречь столик-тележку от механического воздействия и ударов.
4. Во избежание повреждений поверхности необходимо использовать мягкую ткань при чистке изделия.
5. Перемещение столика-тележки должно осуществляться по гладкой поверхности.
6. Колеса необходимо смазывать натриевой консистентной смазкой раз в 6 месяцев.
7. Расшатанные стойки и колеса столика-тележки подлежат ремонту.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок службы изделия при соблюдении инструкций по использованию составляет не менее 6 лет с даты ввода в эксплуатацию.

Условия хранения:

температура: от -5 °С до 40 °С
относительная влажность: не более 85%
атмосферное давление: 86 кПа ~ 106 кПа

Условия рабочей среды:

температура: 10 °С ~ 40 °С
относительная влажность: не более 85%
атмосферное давление: 86 кПа ~ 106 кПа

Требования к транспортировке:

не переворачивать



не кантовать



воздействие влаги недопустимо



7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не должно использоваться после истечения срока службы во избежание нанесения вреда пациенту и окружающим из-за изношенности материала.

Все упаковочные материалы должны быть утилизированы надлежащим образом. В случае утилизации изделия пластиковые и металлические части должны быть отделены друг от друга.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование медицинского изделия: Столик-тележка медицинская инструментальная «Медицинофф» с принадлежностями
Обозначение (вариант исполнения): F-17

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации: ГОСТ Р 51084-97 (разд. 6,8).

Штамп производителя

Дата выпуска
201__год

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение 12 месяцев со дня продажи изделия и включает в себя замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменного обращения (рекламационного акта). Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- механические повреждения;
- дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия и/или его несоответствующего использования;
- настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному Руководству по эксплуатации, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 18 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

М.П.

(с расшифровкой подписи)